


Sensor FloTrac Monitor Vigileo

Guía de instalación

6. Presurice el **manguito de presión** hasta los 300 mmHg. Retire cualquier burbuja que haya quedado en el sistema tirando del lavador del sistema FloTrac.
7. Conecte el cable de presión arterial del monitor de cabecera al conector del cable **rojo** del sensor FloTrac.
8. Conecte la línea al catéter arterial y, a continuación, aspire y purgue el sistema para asegurarse de que no queden burbujas residuales.
9. Nivele el sensor FloTrac con el eje flebotático. **Nota: Es importante mantener nivelado el sensor FloTrac con el eje flebotático en todo momento para asegurar la exactitud del Gasto Cardíaco**

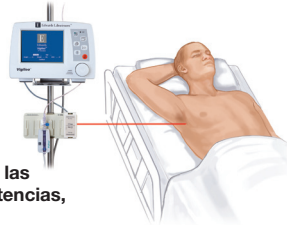

Para uso profesional. Consulte las instrucciones de uso para obtener toda la información de prescripción, incluidas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y efectos adversos.


Todos los productos sanitarios de Edwards Lifesciences puestos en el mercado español cumplen con la legislación vigente. Producto(s) Sanitario(s) conforme al RD1591/2009.


Contraindicaciones : No hay ninguna contraindicación absoluta para el uso del sensor FloTrac en pacientes que precisan una monitorización de la presión invasiva.

Edwards, Edwards Lifesciences, el logotipo E estilizado, EV1000 y FloTrac son marcas registradas de Edwards Lifesciences Corporation.



© 2014 Edwards Lifesciences Corporation.
Reservados todos los derechos. ES4087/09-13/CC

Nota: El montaje del sensor FloTrac se realiza del mismo modo que el del transductor de presión. Si no está familiarizado con el montaje del transductor de presión, consulte el montaje paso a paso del sensor.

1. Pulse el botón  del panel frontal para **encender** el monitor Vigileo. La pantalla mostrará un mensaje inicial, **indicando que se está realizando una comprobación automática después del encendido.**
2. Cuando finalice la comprobación automática, introduzca los datos del paciente (sexo, edad, altura y peso) para la medición del Gasto Cardíaco.
3. Utilice la rueda de navegación para seleccionar e introducir valores. Pulse **Continuar** para realizar la selección y abrir la pantalla **principal.**
4. Conecte el cable de conexión de FloTrac al conector del cable FloTrac situado en la parte posterior del monitor Vigileo. Alinee las flechas situadas en la parte superior de la conexión del monitor con la flecha situada en el cable de conexión de FloTrac.
5. Conecte el otro extremo del cable FloTrac con el conector del sensor FloTrac con capuchón verde.
6. Gire la rueda de navegación hasta que resalte la ventana de GC, entonces presione la rueda para abrir el menú de GC.

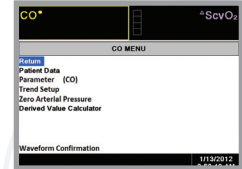

7. Desde el **menú GC**, gire la rueda de navegación **hasta que se resalte Cero de Presión arterial**. Pulse la rueda y aparecerá la pantalla de cero de presión arterial.
8. Abra el sensor FloTrac al aire atmosférico. Gire la rueda de navegación del monitor Vigileo hasta **Cero** y pulse la rueda. Seleccione **Regreso** para salir de la pantalla.
9. Cierre el sensor FloTrac al aire atmosférico con el tapón azul no venteado (incluido en el kit).
10. El Gasto Cardíaco se mostrará a los 40 segundos una vez que la presión arterial haya sido registrada por el sensor FloTrac.
11. Inspeccione la curva de la presión arterial en la pantalla del monitor de cabecera o en la pantalla de confirmación de curva situada en el monitor Vigileo.
12. El cuadro de selección amarillo permanecerá activo durante dos minutos para permitir el cambio de parámetros usando el botón de cambio de pantallas.

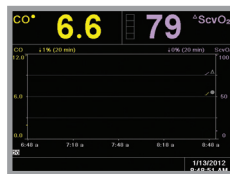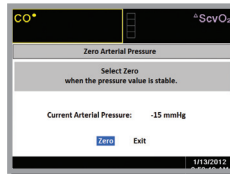

Montaje del sensor FloTrac

1. Abra el embalaje del sensor FloTrac e inspeccione su contenido. Cambie los tapones venteados por los tapones no venteados y asegúrese de que todas las conexiones estén bien ajustadas.
2. Retire el sensor FloTrac de su embalaje y colóquelo en la placa soporte sujeta en el palo de gotero.
3. **Para purgar la bolsa de suero y el sistema FloTrac:** Invierta la bolsa de suero salino (anticoagulación según las directrices de su servicio). Perfore la bolsa de suero salino con el pincho de administración de líquidos, manteniendo vertical la cámara de goteo. Manteniendo invertida la bolsa de suero salino, presione con suavidad para extraer el aire con una mano mientras tira del lavador con la otra hasta que se haya extraído el aire de la bolsa de suero salino y la cámara de goteo quede llena hasta la mitad.
4. Coloque la bolsa de suero salino dentro del **manguito** y cuélguelo del palo de gotero (**sin inflar**).
5. Lavar las líneas y el Sensor FloTrac únicamente por gravedad (**sin presión en el manguito de presión**) manteniéndolas en posición vertical y dejando que la columna de fluido suba por la línea empujando el aire hacia el exterior hasta que el líquido alcance el final de la línea.

